


検体（唾液）の提出にあたっての留意事項（3重梱包の方法）について

★検体（唾液）は原則提出日に採取をお願いいたします。

【検体（唾液）の3重梱包方法】

- ① 唾液を各自が検体採取容器に採取します。（1次梱包）

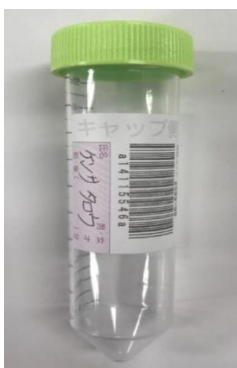

注意事項

- ・採取する前に、容器に貼られているバーコードシールに氏名（カナ）を記入してください。
- ・採取前と採取後に手指消毒の上、マスク、手袋を着用してください。
- ・容器の内側は手で触らないでください。
- ・外側に唾液が付かないよう、ご注意ください。
- ・採取後は容器外側を可能な限りアルコール等で拭き取ってください。
- ・採取10分前は飲食やうがいを控えていただきますようお願いいたします。

ア 蓋を開け、検体採取容器に唾液を直接入れてください。


イ 採取量1～2mL必要です！

ウ 自然に分泌される唾液を口の中に溜めます。


必要量が溜まるまで、繰り返し採取してください（目安5分程度）。

エ 採取後は検体採取容器の蓋をしっかりとめてください。

- ② 吸収バッグで検体採取容器（1個）を包み込み、テープ等で固定します。

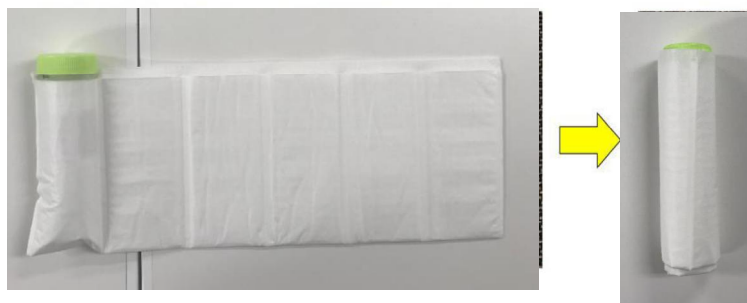

③ 上記②の検体採取容器（1個）をバリアパウチに入れ、十分に空気を抜いた上でジッパーを閉じた後、フラップの接着面のシールを剥がし、密閉します。（2次梱包）

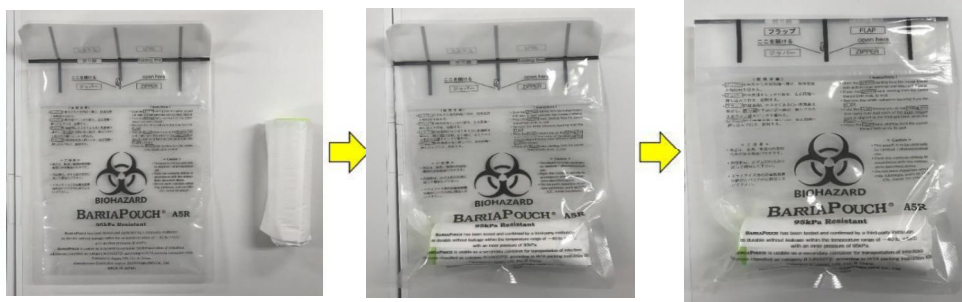

④ バリアボックスにバリアパウチで密封した検体採取容器（1個）を入れ、セキュリティシールを貼り封印します。（3次梱包）



注意事項

・ バリアボックスに貼付されているバーコードシールに受検者の氏名（カナ）を記載してください。

⑤ 上記④のバリアボックスを、大阪府飲食店「スマホ検査センター」に提出します。
（検体搬送業者が回収に伺います）

★ 受検者の氏名とバーコードシール（検体採取容器及びバリアボックスに貼付済）に記載の氏名と番号が一致しているか ご確認をお願いいたします。

★ バリアボックスに貼付しているシール（バーコードシールとは別の物）に検体採取年月日を記入してください。